

Insemination Kit

Composition du kit:

- Flacon de 2 ml de milieu GM501 SpermAir (swim-up)
- 2 seringues stériles de 2 ml
- 1 aiguille courte stérile
- 2 aiguilles longues stériles
- Un cathéter d'insémination
- Fiche explicative
- Un support pour le swim-up en position inclinée



- Le kit d'insémination est un système complet pour la préparation et le traitement simples et sûrs des spermatozoïdes humains hors de l'éjaculat destinés aux inséminations intra-utérines (IUI) homologues et hétérologues.
- Ce kit utilise l'automobilité des cellules germinales mâles pour isoler des spermatozoïdes mobiles en forte concentration. Nous recommandons son utilisation si l'éjaculat est normozoospermique et légèrement oligo- et/ou asthénozoospermique.
- Ne pas équilibrer GM501 SpermAir dans un incubateur à CO₂, seulement le réchauffer à 37°C. GM501 SpermAir est tamponné à l'HEPES. L'incubation dans un incubateur à CO₂ abaisse le pH. GM501 SpermAir marqué CE class III (0344).

Nr. de Ref	Contenance	Péremption*
4SA-KIT-002	Système complet pour une insémination	6 mois
4SA-KIT-002-memo	Système complet pour une insémination avec un cathéter d'insémination Memo	6 mois

*à partir du moment de la fabrication